

折りたたんで
手軽に持ち運べる



Pit II

肌触りが優しくなり、シートカラーのバリエーションもな
オプション部品の見直しや追加によりサポート力がアッ

シートが新しく、
優くなりました。


NEW




ご自分で座り直しが
難しいお子様でもち
よっと周りを見たり、
遊びで手を動かしたり
したときに首の後ろ
や耳、手先や肘が
触れる部分には肌触りが優しく通気性もある
<ブライトニット>を採用しました。汗をかきやすい
背中からおしりにかけては、より通気性の高いメ
ッシュを組み合わせたシートになりました。

basic
基本装備

座シートクッションは大腿部を側方から支え
る外転サポートを内蔵しており、カバーを外
すと形状調節がおこなえます。

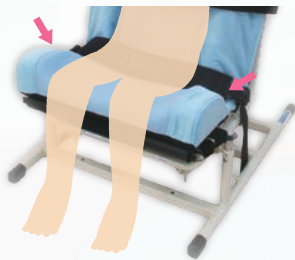


前座フレームの角度可変機構により、股関節の角度設定
(屈曲位～伸展位)調節ができます。

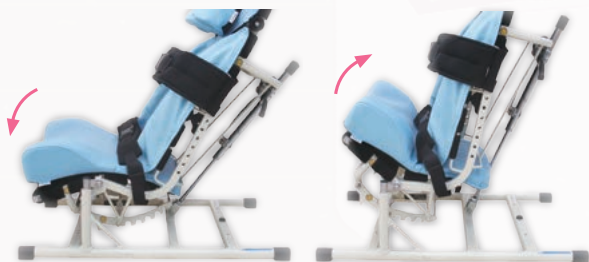

背座両面角可変(股関節屈曲方向～伸展方向)

座位姿勢や膝下の長さに合わせて、
座面の高さ調整がおこなえます。

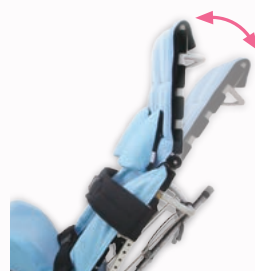

シーティングビラー



テレビを見たり
勉強をしたりなど
活動時



ティルト起し

背もたれと座面の角度が保たれたま
ティルト機構にメカロックを採用し
て設定できます。(実用角度の目安7
またティルト機構で倒しきるだけ
なえます。



コンパクトに
たたんで・持ち運べる
キャリングバック付!

Good!



なんと6色!!
アップしました。

ヘッドサポートの 角度調整が可能に。

バックサポートの折りたたみ部
に採用したダイヤルロック機
構によって、ヘッドサポート(前屈
後屈)の角度調整もおこなえます。

細かい調整と 安定性を備えた 張り調整

張り調整式スリングシートは矢状
曲線の形成が細かくおこなえるテ
ーブル幅になっています。また、スリング
シートとの揺れを防止して張り調整と
インナーパッドの安定を高めるテ
ーブルが装着できるシーティングピラー
を備えたフレーム設計です。



そのまま後方に倒れます。
しており、ティルト角度が無段階
(8度~35度)
、折りたたみがスムーズにおこ

option



オプション

多彩なオプション部品により
ライフスタイルに合わせた
組み合わせが可能です。



ヘッドサポート

首から支える場合はII型。上を向い
てしまう子には頭部のところに厚
みを持たせたI型。いずれかのヘッ
ドサポートが選べます。



キャスターユニット

外に広がったキャスター位置により、
安定性が高く、レッグ、フットサポ
ートを取り付けても向きが変わりま
す。(※レッグサポートの長さ、前座角
度によっては向き変えが難しいこ
ともあります)脱着式ですので、
折りたたみや、収納時には取り外し
て、よりコンパクトにできます。



折りたたみ



キャスター付高さ調整用台座

ダイニングテーブルでのお食事、
床上での活動など、台座の利用で
場面に応じた使い分けも可能です。
(※高さ設定用の調節機構はありま
すが、自在に高さが変わる昇降式で
はありません。)



キャスター

PitIIIに座ったままで向きを替えたり
移動したりと便利なキャスター。
本体にボルトオンできるキャスター
です。(※高さ調整用台座との併用はでき
ません。)




テーブル

高さや角度の調節がおこなえる
テーブルです。持ち運ぶときは、4本
の脚を取り外してコンパクトにでき
ます。



フット・レッグサポート

膝下の長さに合わせて、フット
サポートの高さ、角度とレッグサ
ポートの角度が調節できます。
(※レッグサポートの角度調節は
ボルトナットを追加する必要があります。)

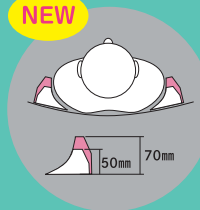

NEW

インナーパッドハイタイプ

体幹部と骨盤部を側方から支えま
す。基本品の高さが50mmのところ
70mmのハイタイプも選択できます。



トランクサポートベルトI型

パッド付きのトランクサポートベ
ルトにより、身体のすぐそばから
しっかりとした保持力で支えるベ
ルトです。



NEW

トランクサポートベルトII型

トランクサポートベルトI型を基本
設計として、ベルト内側のパッド
がより効果的に機能するように
ベルトの幅が広がっています。



NEW

肩ベルト

バックル式で付け外し。
長さ調節、高さ調節ができます。
マジック式もあります。



アームサポート

側方からの移乗もしやすい、はね
上げ開閉式のアームサポートです。
成長変化にあわせて、高さや角度
が調節できます。




スカイブルー




ピンク




パープル

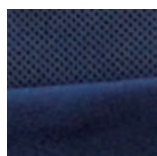

ネイビー

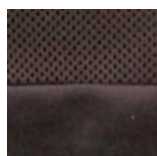

ブラウン

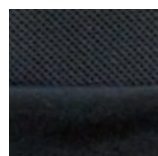

ブラック

フレームカラー



アイボリー



ブラック


※写真の色味が実際の商品と少し異なる場合があります。ご了承下さい。

背・座張り調節スリングシート



調整例

→ 張る → ゆるめる

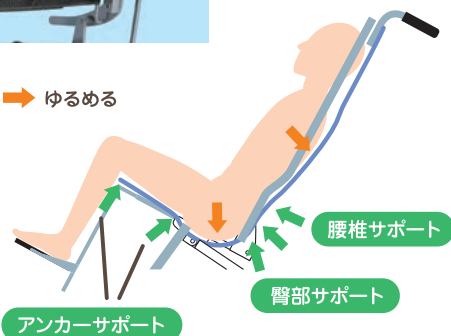


- バックサポートは、①骨盤の前後の傾き（バックサポート下部）②体幹の前後の傾き（バックサポート中央～上部）③腰部の支え（バックサポート腰部）を考慮して調整します。また、左右の張りを変えることができるので、側弯による背中へのろっ骨隆起などの非対称にもある程度対応することができます。
- 座面は臀部（坐骨周辺）をゆるめてお尻を包み込むようにし、坐骨前方から大腿部にかけてスリングをしっかりと張って臀部を安定させ（アンカーサポート）、お尻の前すべりを起きにくくします。

◎帯状のスリングベルト（マジック式）の張り加減を調整することで、使用される方の身体形状に個別に対応することができます。矢状面に加え、水平面の調整もおこなえます。

◎よりこまかく調整がおこなえるよう部分的にスリングベルトの幅が異なり背スリングを二分割しています。

インナーパッド

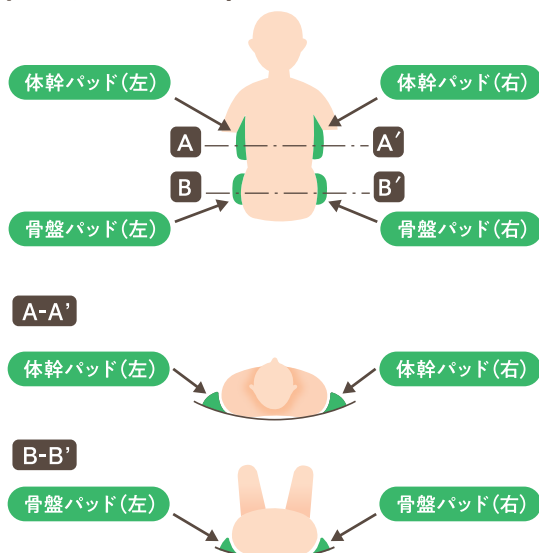


体幹パッド

- ろっ骨下部から胸郭の重みを受け止めるように体幹部の側方からサポートします。体幹部の横倒れや水平面方向のころがり（回旋）に注意して、調節スリングシートと胸郭とのくさび状の隙間を埋めるよう身体に沿わせて取り付けます。
- 側弯などの影響で一方に体が傾く場合は、体幹パッドの取り付け位置・高さを左右非対称にして対応することもできます。

骨盤パッド


- 正面から見て骨盤の中央あたりを高さの目安として下さい。また、骨盤の前後左右の傾きや水平方向のころがり（回旋）に注意して、調節スリングシートと骨盤部とのくさび状の隙間を埋めるよう身体に沿わせて取り付けます。

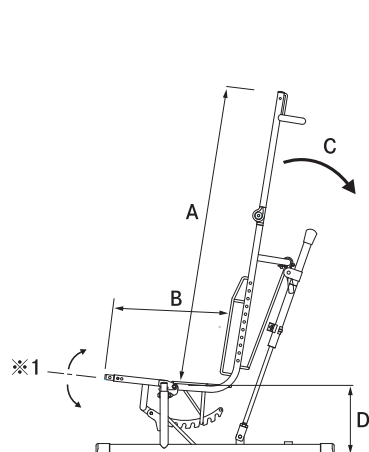

		Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
座幅	mm	370	390	410
背高さ(A)	mm	625	700	760
座奥行き(B)	mm	205～245	235～295	285～365
ティルト角度(C)	度	約78°～約22°(倒しきりまで)		
支点高(D)	mm	165～235	165～235	175～245
前座角度可変	度	水平より屈曲33度・水平より伸展39度(※1)		
基本重量	kg	約6.3	約6.8	約7.2
フレーム		ベースフレーム=アルミ材、背・座フレーム=ステンレス材		
調節スリングシート		マジックシート・テープ=ナイロン100%		
シートユニット		メッシュ生地=ポリエステル 100%		
対応身長の目安	cm	90～110	100～130	120～140

※基本重量=基本的なシートユニットを取り付けた場合の重量

オプション

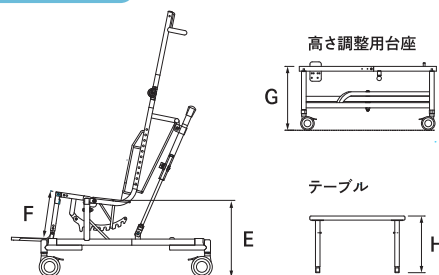

		Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
座高(E) (キャスターユニット付)	mm	275	275	290
足台高(F)	mm	130～190	170～250	170～250
高さ調整用台座(G)	mm	280～370		
テーブル高さ(H)	mm	250～390	275～435	300～480

株式会社 きさく工房

〒811-2126 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南5-10-11
TEL.092-932-7600 FAX.092-932-1037
<https://kisakukobo.jp>
E-mail info@kisakukobo.jp