



NATURE BEIGE

シートカラー：ベージュ




HORIZON BLUE

シートカラー：グレイ



URBAN GRAY

シートカラー：ブラック

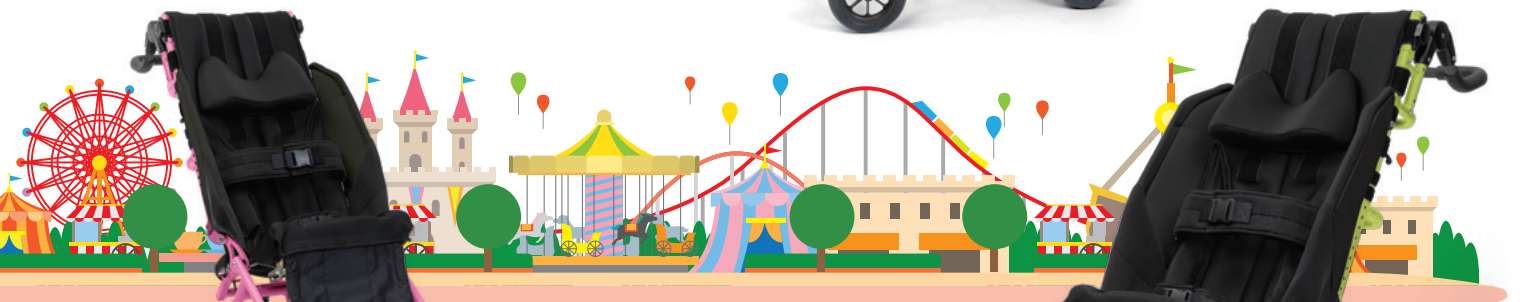

CHERRY PINK

シートカラー：ブラック



SPRING GREEN

シートカラー：ブラック



ダブルリクライニングバギー

WRBII

5つのフレームカラーに3つのシートカラーで15通りのパターンから、
お好みの1台をセレクトしてください。

使いやすさを追求した、みんながうれしい車いす。

新方式リクライニングを使うと
身体のスベリやずれがないから、
座り直しすることが少なく、
みんなが快適。

新リクと背リクを倒して、さらに座面
前方の角度を下げることで介助しやすい
姿勢にチェンジすることができます。

自在にシートを倒したり
起こしたりが出来るから、
着替えやおむつ替えのときに
とっても便利。



OPTION

多彩なオプション部品により、ひとりひとりの体格、
そして使用用途に合わせたパッケージが可能です。



アンダートレイを取り付けて
荷物台としてご利用いただけます。

たくさんの荷物を載せたいときは、
バギー用バスケット「きやるる」を取り
付ける事ができます。製品の詳細や購入
方法につきましては、取扱業者または
(株)こっば舎へお問い合わせください。



きやるる ホームページ



装着した状態で
折りたたみができます

毎日使うものだから心地よく。
素材や仕様にもこだわりました。



移動中に不意に手が飛び出ないように、またリクライニングを倒したときに腕の重みを支えるため、サイドガードを基本装備。腕の重さをしっかりサポートするためにたわみにくい芯材と、でも手がふれるところはソフトなクッション材を組み合わせています。


肌が接触しやすい部分には、肌触りが優しく通気性の良い生地【ブライトニット】を採用しました。



全てのサイズに背高さ調整機構がついています。




押し手グリップは、高さ、角度の可変の操作が簡単なプッシュ式。

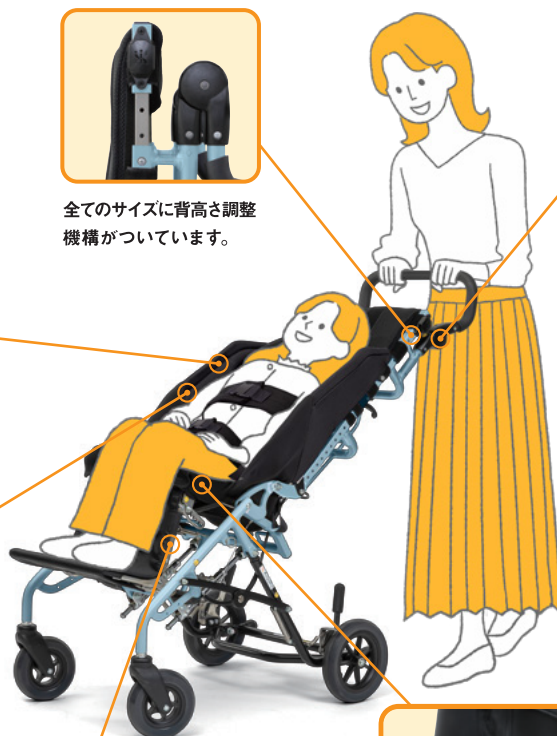

レッグサポートとフットサポートは、高さ、角度の調整が可能。下腿から足部にかけて適切なサポートがおこなえます。



移動中に足が外側に出ないように基本装備のカバーに外転パッドを内包することができます。

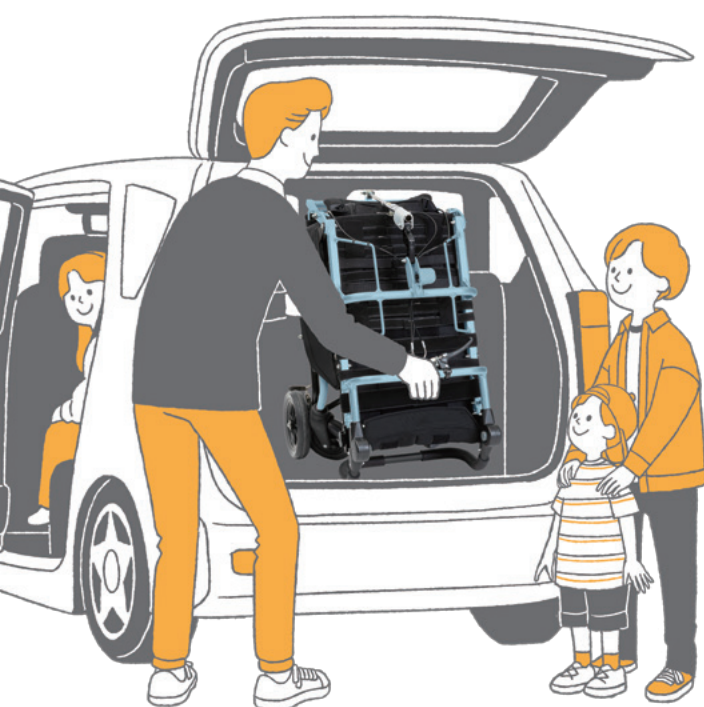

コンパクトに折りたためるから、
お出かけのときや
収納時にとっても便利。
簡単に折りたたため、
コンパクトにすることができます。

福祉車両ではバギーに乗車したまま乗り込むことができます。

※車両への固定、衝突安全テストについては裏面をご覧ください。



インナーパッド・ハイタイプ
厚みが+20ミリの70ミリでサポート力がアップします。



外転パッド
基本装備のカバーに外転パッドを内包することができます。身体状況に合わせて位置調整が可能です。
※カバーは外転防止パッドの有無に関らず取付けが可能なデザインになっています。



日よけ
日の傾きによって開き角度の調節ができます。
遮光率 100% UVカット率 90%以上



アームサポート
跳ね上げ開閉式で高さ調節、角度調節ができます。



車載固定部品
WRBIIを福祉車両に載せたときに自動車のフックをかけるための金具です。



アンダートレイ
身の回り品や吸引器など搭載することができます。装着した状態で折りたたみができます。



トラंकサポートベルトⅠ型 骨盤サポートベルト
身体の上からしっかりとした保持力で支えるベルトです。



トラंकサポートベルトⅡ型
トラंकサポートⅠ型を基本設計として、ベルト内側のパッドがより効果的に機能するようにベルトの幅が広がっています。



テーブル
腕の重さを支えます。高さ・角度が調節ができます。モールド座面選択時にはテーブル足部品が低くなるため、高さ調節範囲は減少します。
※S、M、Lサイズのみ




転倒防止装置
車体の後方転倒を防ぎます。



キャリパーブレーキ
スピードを低減するためのブレーキ。押し手グリップにブレーキレバーが付きます。

WRBIIはリクライニングをしても身体とバックサポートのずれが生じにくいティルトのような座りごこちの「新方式リクライニング機構」と、さらにもう一つの「背もたれリクライニング機構(オフセット)」によりゆったりと休息することができるダブルリクライニングバギーです。


ケアポジション

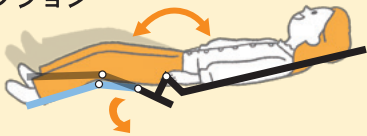

バックサポートと前座やレッグサポートの角度をかえると、お着替えやおむつ替えなどが快適におこなえます。

リクライニングその他角度可変についての詳しい情報は総合カタログをご覧ください。



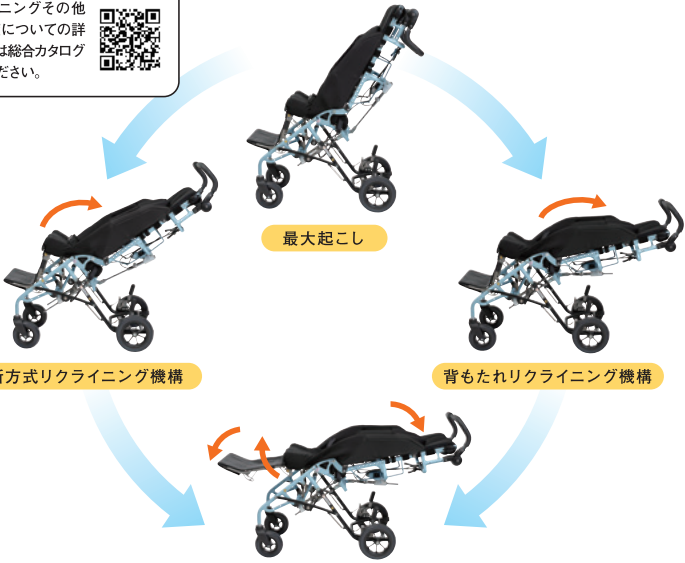


最大起し

新方式リクライニング機構

背もたれリクライニング機構

新方式リクライニング機構 + 背もたれリクライニング機構 + ケアポジション

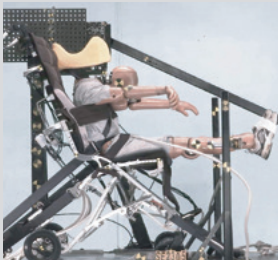

ISO (国際規格) による衝突安全テスト「ISO7176-19AnnexA」にSサイズからLLサイズまで全てのサイズで合格しました。


※車椅子の固定方法とシートベルトの構成は車種によって様々であり、国際規格によるテストの性能を常に発揮できるものではありません。また、実際の事故の状況はテスト条件より複雑です。車載使用は原則としてお客様のご判断となります。

張り調整式スリングシートとインナーパッドによるシーティングシステムとは。

バックサポートと座シートの「張り調整式スリングシート」の張り加減と、胸郭や骨盤のそれぞれを左右から支える「インナーパッド」の位置調整や形状調整により、お子様ひとりひとりの体型や姿勢に合わせた設定がおこなえます。お使いいただくなかでの成長変化や身体状況の変化、姿勢設定の変更に対応することができます。


- ①「張り調整式スリングシート」は、スリングベルトの場所毎の張り加減、緩め加減によって（身体を横方向から見る「矢状面」では骨盤から背骨の伸び具合の調整を、また（上下方向から見る「水平面」では、からだの自然な丸みのラインに合わせて受け支える面を形成します。また、脊柱側弯による背中のふくらみの左右差の形成もおこなえます。
※胸郭の左右差については、胸郭の膨隆の程度にもよります。
- ②「インナーパッド」は、体幹部の横倒れや水平面方向の身体のころがり（回旋）を支えることができます。
- ③ 取り付け位置の微調整がおこなえ、またカバーから取り出してパッド（ウレタン）を切削や貼り足すなどして形状調整もおこなえます。

張り調整式スリングシート

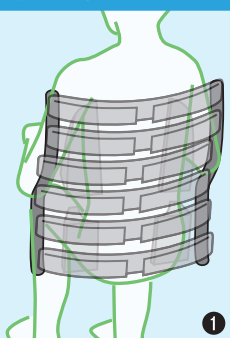


①

インナーパッド

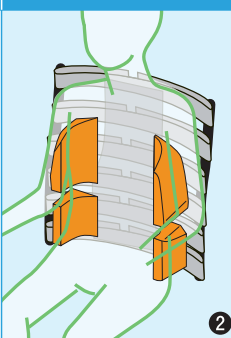


②

取り付け位置調整

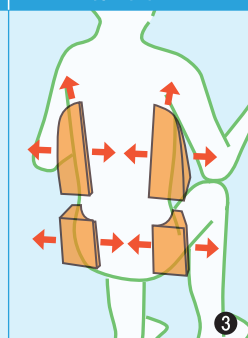

③

※詳細な調整方法につきましては、総合カタログや取扱説明書をご覧ください。

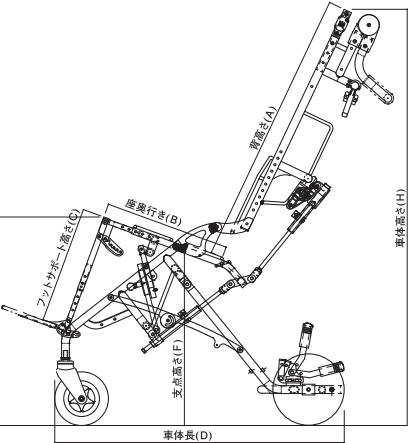

		Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ	LLサイズ
背幅／座幅	mm	385／365	385／365	410／390	455／435
背高さ (A)	mm	655～715	705～765	775～835	790～850
座奥行き (B)	mm	190～230	240～300	290～370	350～430
フットサポート高さ (C)	mm	200～270	230～320	250～360	290～430
前座高さ (E)	mm	532	542	566	578
支点高さ (F)	mm	480／540	480／540	500／560	500／560
車体寸法 (W×D×H)	mm	540×750×1055	540×750×1095	565×810×1165	610×810×1170
折りたたみ寸法 (W×D×H)	mm	540×755×480	540×785×460	565×850×500	610×865×480
新リクライニング角度(後座角)	度	20°～45°			
背リクライニング角度 (背・後座角度範囲)	度	95°～141°			
エレベーディング角度	度	90°・105°・120°・136°・153°・173°			
フットサポート角度	度	90°・104°・118°・132°・146°			
基本重量 (シート重量含む) ※アンダーレイを除いた重量	kg	14.8	15.1	16.9	18.1
調節スリングシート	材質	ナイロン100%			
シートユニット	材質	ポリエステル100%			
対応身長	cm	約90～110	約110～130	約120～140	約145～170

株式会社 **きさく工房**

〒811-2126 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南5-10-11
TEL.092-932-7600 FAX.092-932-1037
<https://kisakukobo.jp>
E-mail info@kisakukobo.jp